

使用說明書（仿單）

玻麗舒 疤痕護理凝膠
Polyxal scar care silicone gel



衛署醫器製壹字第 002848 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

- 產品說明**
1. 玻麗舒疤痕護理凝膠 Polyxal scar care silicone gel 是一種局部外用的矽凝膠，顏色透明且快乾，可用於處理因燒燙傷、外科手術、整形手術、刀傷、擦傷、撕裂傷及其他外傷所產生的疤痕，以及處理肥厚性與蟹足腫疤痕。
 2. 玻麗舒疤痕護理凝膠 Polyxal scar care silicone gel 的作用原理是給予表皮壓力及保濕作用，因此可幫助軟化紅色凸起之疤痕，使疤痕恢復平坦光滑，淡化疤痕顏色，並且可減少疤痕的刺癢及不適感。
 3. 玻麗舒疤痕護理凝膠 Polyxal scar care silicone gel 使用方便，塗抹後在皮膚表面形成一層透明薄膜，迅速乾燥不沾染。

效 能 用於處理閉合性細胞增生型（肥厚狀或蟹足腫）疤痕。

主 成 份 Polysiloxane。

包 裝 管狀包裝，每管內含15克矽凝膠。

- 用 法**
1. 每天二回，早、晚各使用一次，至少持續使用3個月。
 2. 使用前先用清水或中性肥皂將疤痕部位及四周洗淨，自然風乾。
 3. 將本凝膠擠少量於疤痕處，順著疤痕薄塗開，塗抹時可將過厚的凝膠同方向推展開來，勿來回塗抹。
 4. 約2-3分鐘，玻麗舒疤痕護理凝膠 Polyxal scar care silicone gel 會自然風乾，風乾後即可穿上衣服或上妝。一般7公分疤痕只需要直徑0.2公分劑量即可。
 5. 若3分鐘內凝膠仍未乾即表示用量過多，可將過厚部份抹掉，下次可減量使用。

- 警 告**
1. 不可用於仍未完全癒合的傷口、開放性傷口、遺未折線的傷口、三級燒燙傷與新的傷口。
 2. 不可以塗抹於黏膜處或太接近眼睛。
 3. 不可以塗抹於已使用抗生素製劑或其他皮膚治療產品的肌膚上面。
 4. 限用於清潔且乾燥的皮膚上。

注 意 如塗抹部位發生紅疹或刺激性，請暫時停止使用並徵詢醫師或藥師意見。

儲 存 儲存於陰涼乾燥處。請放在兒童無法取得之處。

製 造 廠 友霖生技醫藥股份有限公司桃園製藥廠
廠址：桃園縣桃園市大誠路11號

藥 商 友華生技醫藥股份有限公司
地址：台北市大安區復興南路一段368號7樓

台灣總經銷 天義企業股份有限公司
地址：台北市復興南路一段129號5樓
消費者服務專線：0800-060-689