

## 海捷特®關節腔注射劑

Hya-Joint®

Synovial Fluid Supplement

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書  
並遵照指示使用。

## 處方，每毫升含有：

主成分：透明質酸鈉鹽10毫克  
賦劑型：碳酸氫二鈉、碳酸二鈉、氯化鈉、注射用水加至1.0毫升  
酸鹼值：pH 6.8-7.8

## 產品描述

海捷特關節腔注射劑(下稱：本產品)為將透明質酸充填於玻璃注射筒內的產品。本產品為無色、透明、黏稠、無菌且無熱原之注射液。此透明質酸(分子量65-120萬道爾頓)的來源為微生物醱酵。本產品僅供一次性使用。透明質酸是一種天然的多醣類，是皮膚、皮下組織、結締組織和關節液的重要組成成份。透明質酸不具有種屬特異性且生物相容性高。

## 產品規格

每毫升含10毫克透明質酸鈉，置於HYPAK SCF 3ML PRTC針筒，容量及包裝如下：  
2.0 毫升/支，一支裝或十支裝  
2.5 毫升/支，一支裝或十支裝  
3.0 毫升/支，一支裝或十支裝

## 適應症

限用於保守性非藥物治療無效及一般鎮痛劑如Acetaminophen治療無效之退化性膝關節炎疼痛患者。

## 劑量

成人每次療程使用3支本產品，每週一支於退化性膝關節炎之患處注射之。本產品適用於膝關節腔注射，其使用劑量及注射時間伴隨患者症狀而異。本產品建議搭配18-25G無菌針頭使用，將內容物注射到膝關節腔內。

## 作用機制

本產品可以抵消外界傳來的機械壓力，它是保護關節的屏障。本產品可保護關節腔組織，促進關節軟骨的癒合。

## 禁忌症

不可注射於已知對透明質酸過敏之患者。  
注射部位有感染或皮膚疾病之患者不可使用。

## 警告

本產品供作關節腔植入物使用。切勿將本產品再滅菌或者與其它產品混合。本劑不可注入血管內，且應避免注入組織中。醫生應該注意曾經有藥物過敏病史以及罹患肝臟疾病之患者。

## 使用於高齡者

由於高齡者的器官功能衰減，醫師應特別注意。

## 使用於孕婦或授乳婦女

唯有預期療效大於潛在副作用時，方可使用本產品。  
授乳婦女在治療期間應暫停哺乳。

## 使用於兒童

本產品應用在兒童之安全性未獲確認，因此醫師在療程中應特別注意。

## 注意事項

- 使用本產品時，必需配合當地的法律規定，並由合格的專業醫師操作。
- 在完成每一次療程之後，必需將針筒、針頭和任何未使用的剩餘材料丟棄。
- 如發現包裝已被拆封或有破損，請勿使用。
- 使用前請詳閱說明書。

## 貯存條件

遵照包裝上的指示，將本產品貯藏於室溫下，避免受到陽光的照射和冷凍的環境。

製造日期與保存期限標示於產品標籤及外包裝上  
有效期間 3 年

## 製造廠及藥商

製造廠名稱：科妍生物科技股份有限公司  
製造廠地址：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號  
藥商名稱：科妍生物科技股份有限公司  
藥商地址：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號  
E-mail: service@scivision.com.tw

	僅供一次性使用		包裝破損禁止使用
	貯存溫度最高不可超過30°C		製造批號
	製造日期		製造廠
	保存期限		參閱使用說明
	無菌標示，針筒內容物已經過蒸汽滅菌。		
	符合 MDD93/42/EEC 認證而得 CE 標誌。		

科妍® SCIVISION® PIHJF-01(17) 20180115